

Vennligst les brukerveiledningen nøye før bruk av FungeX® Neglesopp Plaster. Kast ikke dette vedlegget.

### FUNGEX® NEGLESOPP PASTER

- Effektiv behandling av soppinfeksjoner i neglen
- Raske og synlige resultater
- Enkel og presis applikasjon
- Påføres bare en gang om dagen
- 8 timer sammenhengende behandling mot neglesopp
- Ingen filing er nødvendig

### OVERSIKT PAKNINGSVEDLEGG

1. Hva er FungeX® Neglesopp Plaster?
2. Hvordan brukes FungeX® Neglesopp Plaster
3. Bivirkninger
4. Graviditet og amming
5. Oppbevaring
6. Forsiktighetsregler
7. Innhold
8. Ingredienser

### 1. HVA ER FUNGEX® NEGLESOPP PASTER?

FungeX® Neglesopp Plaster er et revolusjonerende medisinsk utstyr som gir en effektiv og intensiv behandling av neglesopp og misfargede, deformerte (tå) negler. FungeX® Neglesopp Plaster gir naturlig pleie ved kontinuerlig frigjøring av aktive ingredienser i maksimalt på 8 timer. På grunn av sin unike formulering har den også en fuktighetsgivende effekt. Plasterets spesiallagde form gir en praktisk, enkel og effektiv påføring.

FungeX® Neglesopp Plaster behandler neglesopp, forbedrer utseendet på neglen og reduserer misfarging.

### 2. HVORDAN BRUKE FUNGEX® NEGLESOPP PASTER

Rengjør først neglen og fjern neglelakk, støv eller olje før hver påføring. Ingen filing av neglen er nødvendig før bruk.

1. Etter å ha fjernet den gjennomsiktige platen (1), fjern det tynne klistremerket som ligger på den negleformede lappen (2).

2. Plasser det negleformede plasteret på midten av neglen for å sikre behandling på stedet. Fjern den hvite stripen i bunnen av plasteret (3).

3-4. Tett sidene av (tå) neglen tett med vingene på plasteret, etterfulgt av å pakke inn tå eller fingertupp med den gjenværende øvre delen.

5. La FungeX® Neglesopp Plaster sitte på (tå) neglen i 8 timer for å sikre en effektiv og intensiv behandling, helst om natten. Påfør plasteret en gang daglig på de berørte neglene.



Det beste resultatet er synlige ved daglig behandling så lenge neglen påvirkes. Behandlingsvarigheten varierer avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden og bør fortsette til en frisk negl har vokst ut. I de fleste tilfeller vil en ny negl vokse i løpet av 3-6 måneder.

### 3. BIVIRKNINGER

Det er ingen kjente bivirkninger når FungeX® Neglesopp Plaster brukes i henhold til bruksanvisningen.

### 4. GRAVIDITET OG AMMING

Formelen er bare lokalt aktiv og kan derfor brukes under graviditet og amming. Skal barn bruke plasteret, ta kontakt med legen din før behandling.

### 5. OPPBEVARING

- Oppbevares tørt i romtemperatur.
- Holdes utenfor barns rekkevidde.
- Forsegl låsen godt for lagring av gjenværende plaster i folieposen for å forhindre tørking.



### 6. FORSIKTIGHETSREGLER

- Kun for utvortes bruk.
- Unngå bruk på irritert eller solbrent hud og i direkte kontakt med øynene.
- Slutt å bruke hvis huden din blir rødlig, hoven eller kløende mens du bruker eller etter bruk.
- Ikke bruk dette plasteret hvis du har opplevd bivirkninger av noen type plaster.

### 7. INNHOLD:

14 FungeX® Neglesopp Plaster

### 8. INGREDIENSER:

Urea, 1,3-butylenglykol, fumarsyre.

Alle henvendelser om produktet skal sendes til distributøren. For mer informasjon om FungeX® Neglesopp Plaster, besøk [www.fungex.no](http://www.fungex.no).

FungeX® er et registrert varemerke for TheOTCLab

### DISTRIBUTØR

TMOS Pharmæ AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum  
Norway



PRODUSENT  
Wooshinlabottach CO., LTD  
1012~1015, B building,  
Songdo BRC Smart Valley,  
30, Songdo Mirae-ro, Yeonsu-gu,  
Incheon, Korea

Siste revisjon:  
november 2019

**EC REP** Autorisert representant  
Wooshin Hungary Kft.  
1118 Budapest, Számádóutca  
19. fszt. 3, Hungary



V9771801/19K1

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, inden du bruger FungeX® Neglesvamp Plaster. Smid ikke denne brugsanvisning væk

### FUNGEX® NEGLESVAMP PLASTER

- Effektiv behandling af neglesvamp infektioner
- Hurtige og synlige resultater
- Nem og præcis anvendelse
- Anvendes kun en gang dagligt
- 8 timers konstant behandling af neglen
- Det er ikke nødvendigt at file neglen

### INDHOLD I DENNE BRUGSANVISNING

1. Hvad er FungeX® Neglesvamp Plaster?
2. Sådan bruges FungeX® Neglesvamp Plaster
3. Mulige bivirkninger
4. Graviditet og amning
5. Opbevaring
6. Advarsler
7. Indeholder
8. Ingredienser

### 1. HVAD ER FUNGEX® NEGLESVAMP PLASTER?

FungeX® Neglesvamp Plaster er et revolutionerende medicinsk udstyr, der giver en effektiv og intensiv behandling af neglesvamp og misfarvede, deforme (tå) negle. FungeX® Neglesvamp Plaster giver naturlig pleje ved kontinuerlig frigivelse af aktive ingredienser i maksimalt 8 timer. På grund af sin unikke formulering har den også en fugtgivende effekt. Den specielt designede form på plasteret giver en bekvem, enkel og effektiv spot-on applikation på neglen.

FungeX® Neglesvamp Plaster behandler neglesvamp, forbedrer udseendet på neglen og reducerer misfarvning.

### 2. SÅDAN BRUGES FUNGEX® NEGLESVAMP PLASTER

Start med at rense neglen og fjern evt. neglelak, støv eller olie inden hver påføring. Det er ikke nødvendigt at file neglen før brug.

1. Efter du har fjernet det gennemsigtige klistermærke (1) skal du fjerne det tynde klistermærke, der er placeret på det negleformede plaster (2).

2. Placer det negleformede plaster på midten af neglen for at sikre spot-on-behandling. Fjern den hvide strimmel i bund af plasteret (3).

3-4. Pæk siderne af (tå) neglen tæt sammen med vingerne på plasteret, derefter pakkes resten af tå eller fingerspidsen ind med den resterende øverste del af plasteret.

5. Lad FungeX® Neglesvamp Plaster sidde på (tå) neglen i 8 timer for at sikre en effektiv og intensiv behandling, helst om natten. Påfør plasteret en gang dagligt på de berørte negle.



De bedste resultater er synlige ved daglig behandling, så længe neglen er påvirket. Behandlingsvarigheden varierer afhængigt af sværhedsgraden af tilstanden og bør fortsættes, indtil en sund negl er vokset ud. I de fleste tilfælde vil en ny negl vokse ud indenfor 3-6 måneder.

### 3. MULIGE BIVIRKNINGER

Der er ingen kendte bivirkninger, når FungeX® Neglesvamp Plaster bruges i henhold til brugsanvisningen.

### 4. GRAVIDITET OG AMNING

Formlen er kun aktiv lokalt og kan derfor bruges under graviditet og amning. Ved brug til børn, skal du kontakte din læge inden behandling.

### 5. OPBEVARING

- Opbevares tørt ved stuetemperatur.
- Anbring pakken hvor børn eller småbørn ikke kan nå den.
- Luk lynlåsen til opbevaring af de resterende plaster i folieposen for at forhindre udtørring



### 6. ADVARSLER

- Kun til udvortes brug
- Undgå brug på irriteret eller solbrændt hud og i direkte kontakt med øjnene.
- Stop med at bruge produktet, hvis din hud bliver rødlig, hævet eller kløende, mens du bruger det eller efter brug.
- Brug ikke dette plaster, hvis du har oplevet en bivirkning på nogen typer af plaster.

### 7. INDEHOLDER:

14 FungeX® Neglesvamp Plaster

### 8. INGREDIENSER:

Urea, 1,3-butylenglycol, fumørsyre.

Alle henvendelser om produktet skal sendes til distributøren. For mere information om FungeX® Neglesvamp Plaster, besøg [www.fungex.dk](http://www.fungex.dk).

FungeX® er et registreret varemærke tilhørende TheOTCLab

### DISTRIBUTØR

TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum  
Norway



### FABRIKANT

Wooshinlabottach CO., LTD  
1012~1015, B building,  
Songdo BRC Smart Valley,  
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,  
Incheon, Korea

Sidst revideret:  
november 2019

**EC REP** Autoriseret repræsentant  
Wooshin Hungary Kft.  
1118 Budapest, Számadóutca 19.  
fszt. 3, Hungary



V9771801/19K1