

Vennligst les pakkingsvedlegget nøye før du bruker FungeX® Neglesopp Pensel. Kast ikke dette vedlegget

FUNGEX® NEGLESOPP PENSEL

- Behandler neglesopp.
- Stopper veksten av sopp som forårsaker neglesopp.
- Forbedrer utseende på neglen og reduserer misfarging.
- Ingen filing er nødvendig
- Klinisk effektiv formel
- Synlige resultater innen 2 uker
- Forhindrer spredning av infeksjonen og hjelper til med å forhindre re-infeksjon

INNHold PAKNINGSVEDLEGG

1. Hva er FungeX® Neglesopp Pensel?
2. Hvordan bruke FungeX® Neglesopp Pensel?
3. Bivirkninger
4. Oppbevaring
5. Forsiktighetsregler
6. Innhold
7. Ingredienser

1. HVA ER FUNGEX® NEGLESOPP PENSEL?

FungeX® Neglesopp Pensel er et medisinsk utstyr for behandling av neglesopp. FungeX® Neglesopp Pensel inneholder en klar væske. Børstespissen sikrer rask og enkel påføring. En flaske er tilstrekkelig for behandling av 1 negl i 4 måneder.

FungeX® Neglesopp Pensel forbedrer utseendet på neglen og reduserer misfarging. Klinisk bevist effektiv, denne formelen viste at de fleste brukere fikk synlige resultater i løpet av 2 uker.

Hvis det etter 3 måneders behandling ikke blir observert noe resultat, må du oppsøke lege for å diskutere alternativ eller tilleggsbehandling.

2. HVORDAN BRUKE FUNGEX® NEGLESOPP PENSEL

Bruk løsningen en gang daglig på rene og tørre negler, helst om kvelden rett før sengetid.

De beste resultatene sees ved daglig behandling så lenge neglen påvirkes. Behandlingsvarigheten varierer avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden, og bør fortsettes til en frisk negl har vokst ut. I de fleste tilfeller vil en ny negl vokse i løpet av 6-12 måneder.

Løsningen virker bare lokalt og kan derfor brukes under graviditet og amming. Det er begrenset erfaring med barn. Konsulter derfor legen din før behandling til barn.

For å forhindre spredning av infeksjonen bør penselen bare brukes av en person og bare på neglesopp.

3. BIVIRKNINGER

Hos noen pasienter kan det oppstå forbigående mindre irritasjon på huden rett ved siden av neglen og misfarging av neglen. I tillegg kan løsning / separering av neglen fra den underliggende neglesengen forekomme, inkludert løsrivelse av den berørte delen av neglen.

4. OPPBEVARING

For å forhindre bruk av forringet produkt og manglende effekt:

- Plasser alltid hetten tett på flasken etter bruk for å forhindre uttørring.
- Ikke bruk etter utløpsdatoen som er vist på flasken og på esken.
- Oppbevares ved romtemperatur.



5. FORSIKTIGHETSREGLER

- Kun for utvendig bruk på neglen.
- Unngå kontakt med hud, øyne eller slimhinner, da det kan oppstå irritasjon;
- Ved svelging av produktet eller ved allergiske reaksjoner, kontakt lege.
- Oppbevares utilgjengelig for barn for å forhindre risiko for kvelning av korken.
- Kontakt legen din hvis symptomene dine forverres eller ikke forbedres.
- Hvis du merker noen bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakkingsvedlegget, må du kontakte legen din eller apoteket.
- Spør legen din eller apoteket hvis du trenger mer informasjon eller råd.

6. INNHold:

1 FungeX® Neglesopp Pensel 5 ml

7. INGREDIENSER:


Monopropylenglykol, vann, melkesyre, urea, natriumhydroksid.

Alle henvendelser om produktet skal sendes til distributøren. For mer informasjon om FungeX® Neglesopp Pensel, besøk www.fungex.no

FungeX® er et registrert varemerke for TheOTCLab

DISTRIBUTØR

TMOS Pharma AS
Camilla Coletts veg 31
2407 Elverum
Norway

 **PRODUSENT**
Pharm Source B.V.
Reduitlaan 33
4814 DC Breda
The Netherlands

Siste revisjon: november 2019



CE 2797
023.007.08
2300708v1

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger FungeX® Neglesvamp Børste. Smid ikke denne brugsanvisning væk.

FUNGEX® NEGLESVAMP BØRSTE

- Behandler neglesvamp
- Stopper væksten af svampe, der forårsager neglesvamp
- Forbedrer neglens udseende og reducerer misfarvning af neglen
- Det er ikke nødvendigt at file neglen
- Klinisk effektiv formulering
- Synlige resultater inden for 2 uger
- Forhindrer spredning af infektionen og hjælper med at forhindre re-infektion

INDHOLD I DENNE BRUGSANVISNING

1. Hvad er FungeX® Neglesvamp Børste?
2. Sådan bruges FungeX® Neglesvamp Børste
3. Mulige bivirkninger
4. Opbevaring
5. Advarsler
6. Indeholder
7. Ingredienser

1. HVAD ER FUNGEX® NEGLESVAMP BØRSTE?

FungeX® Neglesvamp Børste er medicinsk udstyr til behandling af neglesvamp. FungeX® Neglesvamp Børste indeholder en farveløs væske. Spidsen af børsten sikrer hurtig og nem anvendelse. En flaske er tilstrækkelig til behandling af 1 negl i 4 måneder.

FungeX® Neglesvamp Børste forbedrer neglens udseende og reducerer misfarvning. Klinisk bevist effektiv - de fleste brugere fik synligt resultat allerede indenfor 2 uger.

Hvis der efter 3 måneders behandling ikke observeres noget resultat, skal du kontakte en læge for at diskutere alternativ eller yderligere behandling.

2. SÅDAN BRUGES FUNGEX® NEGLESVAMP BØRSTE

Påfør opløsningen en gang dagligt på rene og tørre negl(e), helst om aftenen lige før sengetid.

De bedste resultater ses ved daglig behandling, så længe neglen er påvirket. Behandlingsvarigheden varierer afhængigt af sværhedsgraden af tilstanden og bør fortsættes, indtil en sund negl er vokset ud. I de fleste tilfælde vil en ny negl vokse ud inden for 6-12 måneder.

Opløsningen virker kun lokalt og kan derfor bruges under graviditet og amning. Der er begrænset erfaring med børn. Konsulter derfor din læge inden behandling af børn.

For at forhindre spredning af infektionen bør børsten kun bruges af en person og kun på negle med neglesvamp.

3. MULIGE BIVIRKNINGER

Hos nogle patienter kan der forekomme kortvarig irritation af huden umiddelbart ved siden af neglen og misfarvning af neglen. Derudover kan løsning / adskillelse af neglen fra den underliggende negleseng forekomme, herunder løsrivelse af den berørte del af neglen.

4. OPBEVARING

For at forhindre brug af et forringet produkt og manglende effekt:

- Sæt altid hættten på flasken efter brug for at forhindre dehydrering
- Brug den ikke efter udløbsdatoen, der er vist på børsten og på kartonen.
- Opbevares ved stuetemperatur.



5. ADVARSLER

- Kun til udvendig brug på neglen.
- Undgå kontakt med hud, øjne eller slimhinder, da der kan forekomme irritation;
- I tilfælde af indtagelse af produktet eller i tilfælde af allergiske reaktioner skal du kontakte en læge;
- Opbevares utilgængeligt for børn for at forhindre risiko for kvælning på hættten;
- Kontakt din læge, hvis dine symptomer forværres eller ikke forbedres;
- Hvis du bemærker bivirkninger, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, skal du fortælle det til din læge eller apoteket;
- Spørg din læge eller på apoteket, hvis du har brug for mere information eller gode råd.

6. INDEHOLDER:

1 FungeX® Neglesvamp Børste med 5 ml

7. INGREDIENSER:

Monopropylenglycol, vand, mælkesyre, urinstof, natriumhydroxid.

Alle henvendelser om produktet skal sendes til distributøren. For mere information om FungeX® Neglesvamp Børste, besøg www.fungex.dk.

FungeX® er et registreret varemærke tilhørende TheOTCLab

DISTRIBUTØR

TMOS Pharma AS
Camilla Coletts veg 31
2407 Elverum
Norway



FABRIKANT

Pharma Source B.V.
Reduitlaan 33
4814 DC Breda
The Netherlands

Sidst revideret: november 2019



CE 2797
023.007.08
2300708v1